


FORMATION ED1000

Traiter les troubles de l'érection grâce aux ondes de choc, c'est l'une des stratégies les plus prometteuses depuis l'invention du Viagra, il y a 18 ans*

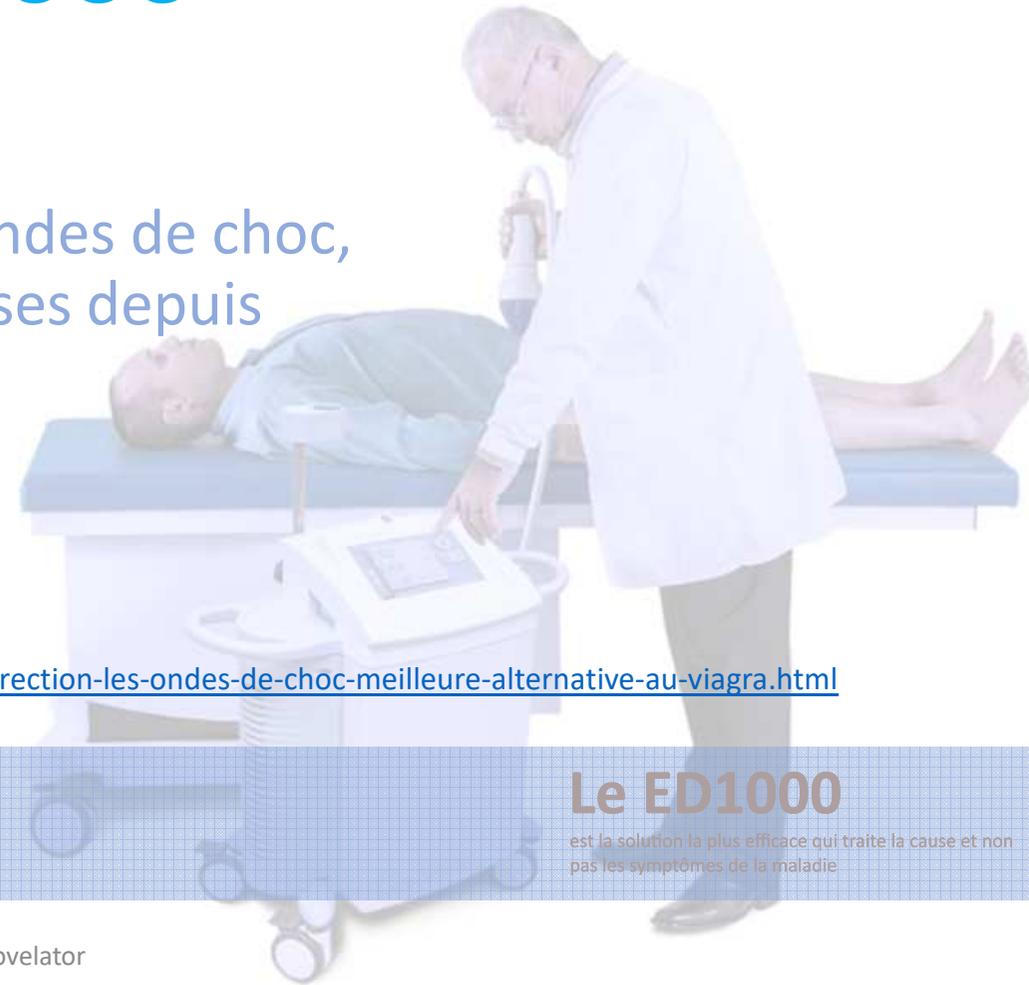

* <http://www.sciencesetavenir.fr/sante/sexualite/20160222.OBS5064/troubles-de-l-erection-les-ondes-de-choc-meilleure-alternative-au-viagra.html>


NOVELATOR
UNE VIRILITÉ RETROUVÉE

Le ED1000

est la solution la plus efficace qui traite la cause et non pas les symptômes de la maladie.

copyrights 2016 Novelator

SOUVENEZ-VOUS QUE...

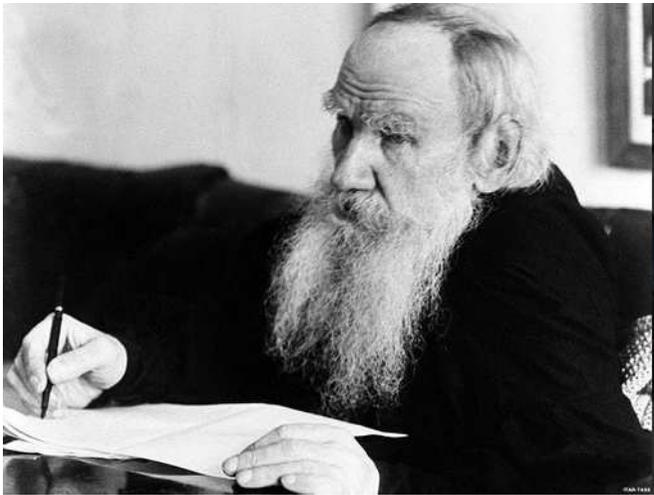

“L’homme peut survivre aux séismes, aux affres de l’horreur et de la maladie, ainsi qu’à toutes les tortures de l’âme. Mais la tragédie la plus terrible de tous les temps est, et restera, **la tragédie de la chambre à coucher.**”

Tolstoy

FORMATION AU TRAITEMENT / AGENDA

- 1. POURQUOI DES ONDES DE CHOC POUR TRAITER LA D.E ?**
- 2. PARCOURS DU PATIENT**
 - 1. QUI EST ELIGIBLE ?**
 - 2. DUREE DU TRAITEMENT**
- 3. PRESENTATION DU MATERIEL**
 - 1. MEDISPEC**
 - 2. PRISE EN MAIN**
 - 3. L'APPLICATEUR D'ONDES DE CHOCS**
- 4. PROTOCOLE OBLIGATOIRE: TRAITEMENT DES CINQ ZONES**
- 5. AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS D'USAGE**
- 6. LE CENTRE DE TRAITEMENT ET NOVELATOR**

FORMATION AU TRAITEMENT / AGENDA

- 1. POURQUOI DES ONDES DE CHOC POUR TRAITER LA D.E ?**
2. PARCOURS DU PATIENT
 1. QUI EST ELIGIBLE ?
 2. DUREE DU TRAITEMENT
3. PRESENTATION DU MATERIEL
 1. MEDISPEC
 2. PRISE EN MAIN
 3. L'APPLICATEUR D'ONDES DE CHOCS
4. PROTOCOLE OBLIGATOIRE: TRAITEMENT DES CINQ ZONES
5. AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS D'USAGE
6. LE CENTRE DE TRAITEMENT ET NOVELATOR

TRAITEMENTS DE LA D.E: LES SOLUTIONS

1 POURQUOI LES ONDES DE CHOC ?



1973

**PENILE
PROSTHESIS**



1982

**INTRACAVERNOSAL
ADMINISTRATION
OF VASOACTIVE
DRUGS**



1983

**VACUUM
DEVICES**



1998

**ORAL
DRUGS**




2010

EDSWT


APPLICATIONS THERAPEUTIQUES

1 POURQUOI LES ONDES DE CHOC ?

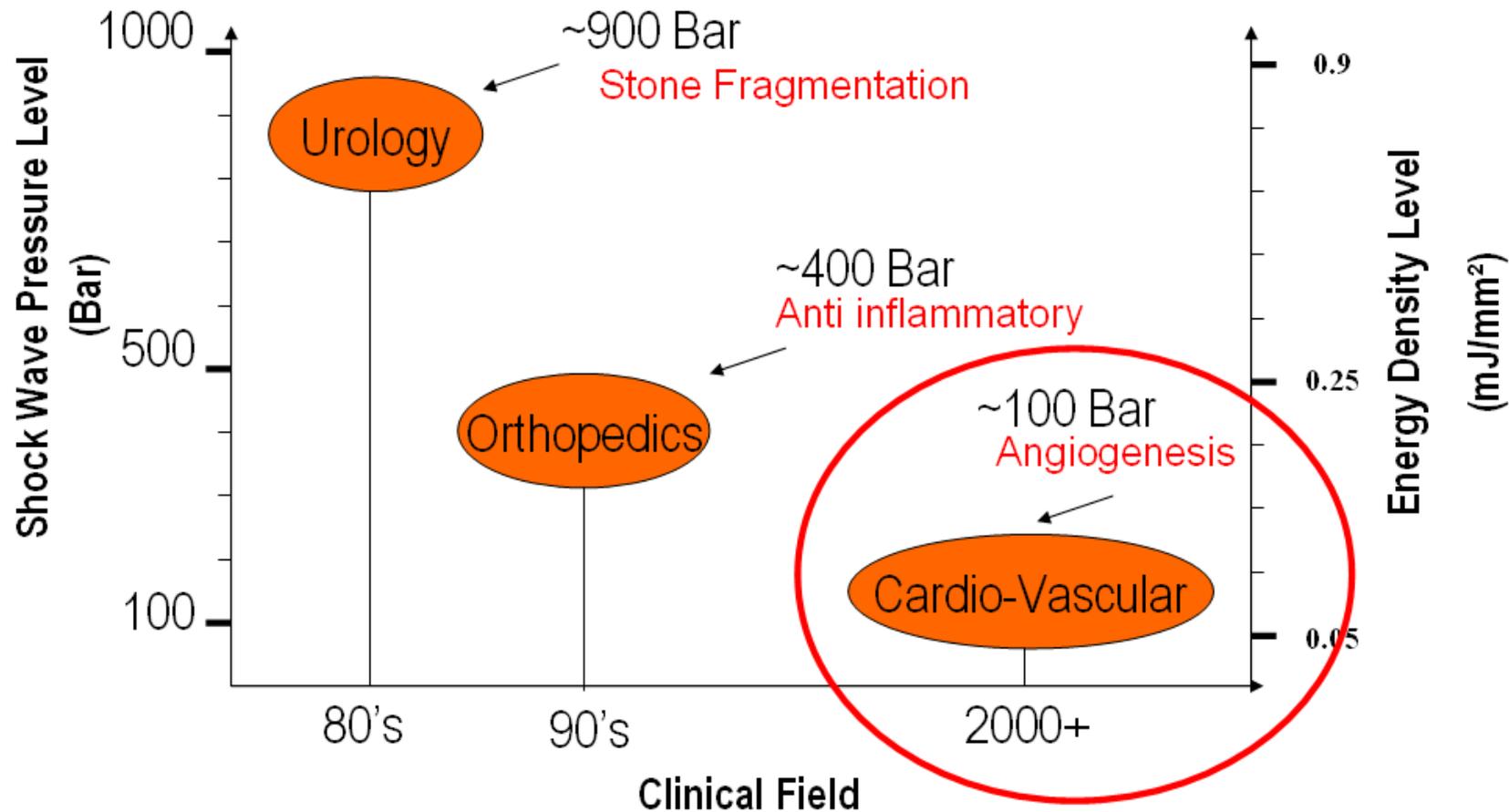

MECANISME

1 POURQUOI LES ONDES DE CHOC ?

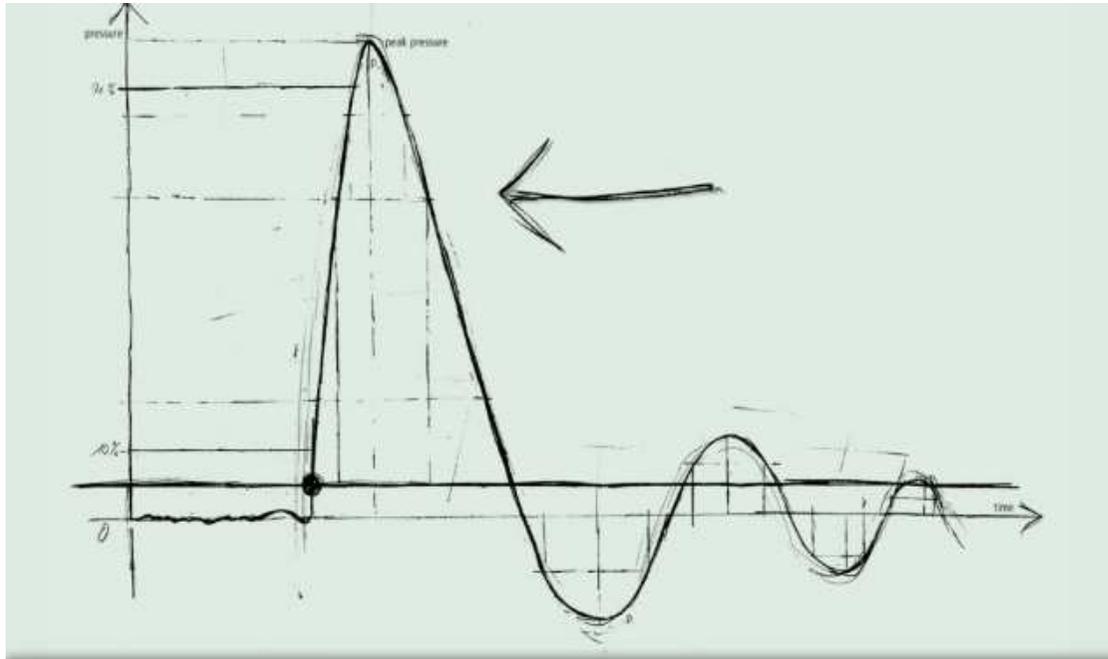



- Les ondes de choc sont des ondes acoustiques caractérisées par des amplitudes de pression élevées de survenue très rapide
- Ces ondes se propagent dans l'eau ou les tissus mous à l'égal des ultrasons sans effet thermique.

FONCTIONNEMENT



1 POURQUOI LES ONDES DE CHOC ?

Le choc est généré par effet hydro-électrique:

- La haute tension crée une décharge électrique
- L'eau s'évapore et déclenche une explosion
- S'ensuivent des ondes de choc à forte énergie
- Réfléchies par la semi-ellipsoïde
- Et situées précisément sur la zone du traitement

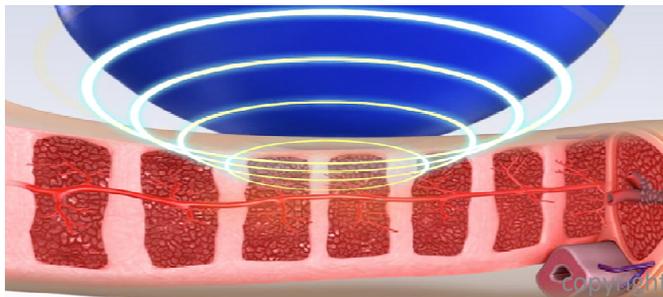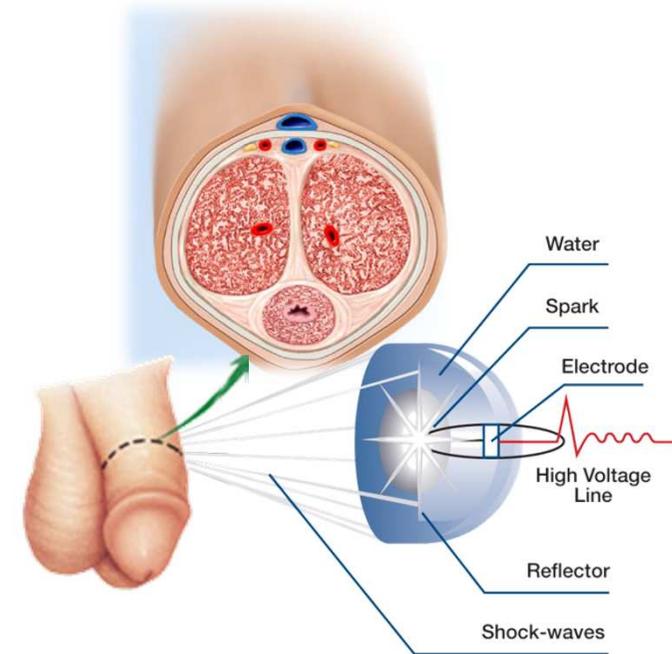

EFFETS CLINIQUES DES ONDES DE CHOC

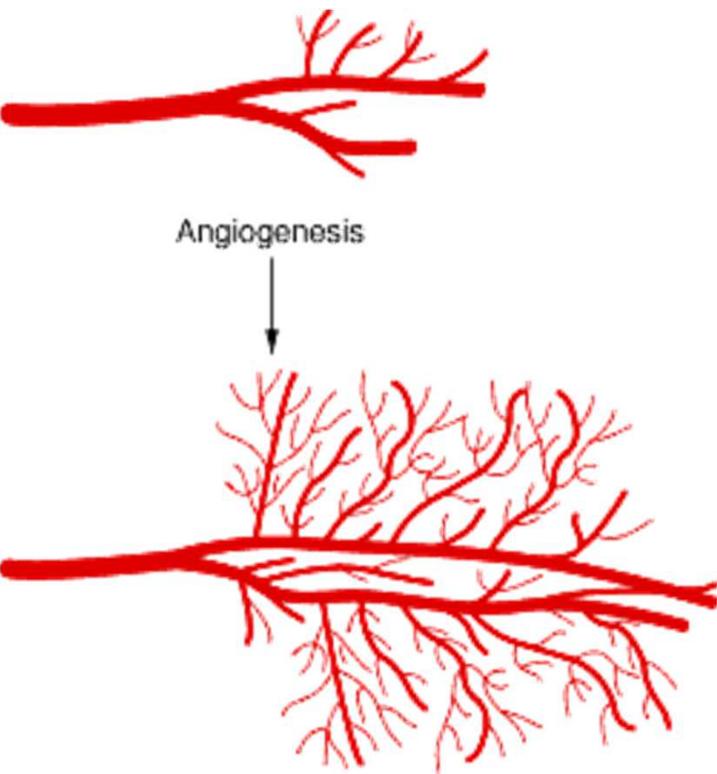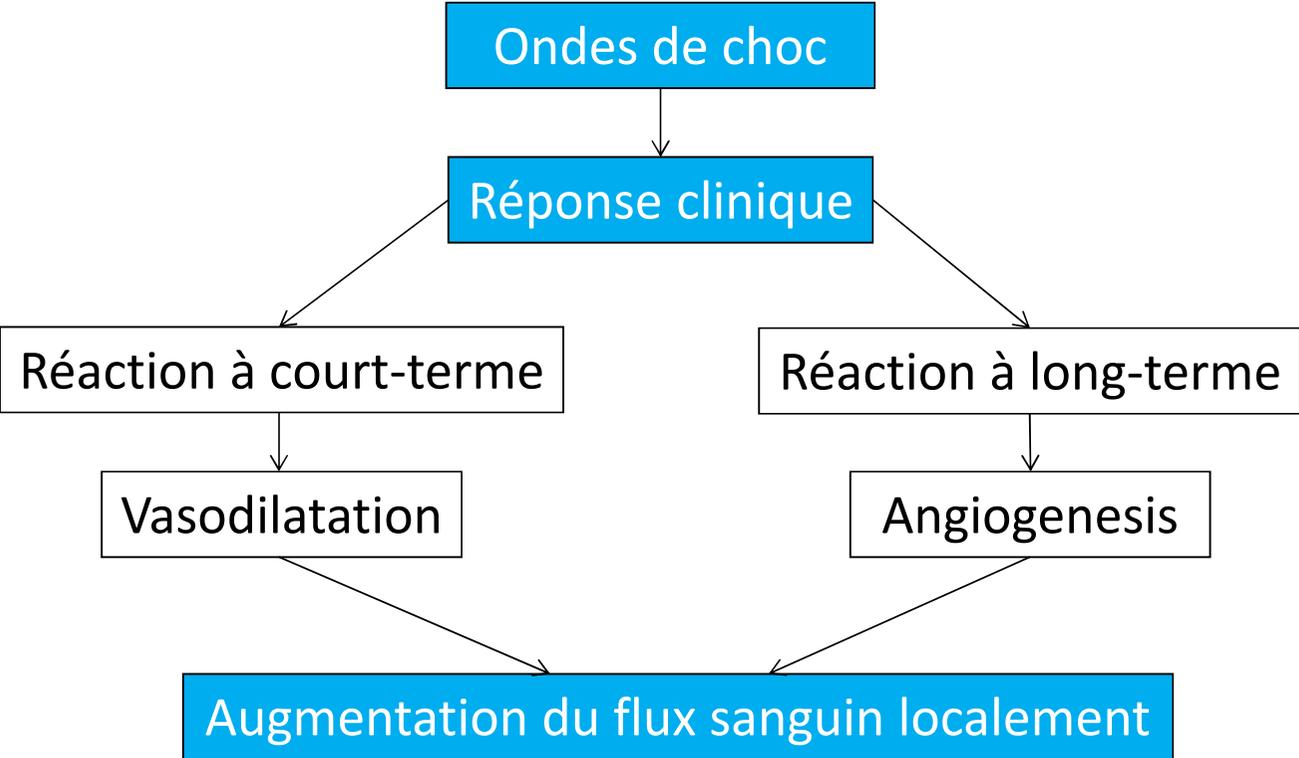

AVANTAGES DES ONDES DE CHOC POUR TRAITER LA DE

1 POURQUOI LES ONDES DE CHOC ?

	Comprimés (IPDE5)	Injections	ONDES DE CHOC
Effets secondaires	 Importants	 Importants	 Très faibles
Spontanéité sexuelle	 Faible	 Faible	 Importante
Durabilité des effets	 Très faible (<1 jour)	 Faible	 Elevée (> 1 an)

SYNTHESE: UN TRAITEMENT RECONNU EFFICACE

- Publications médicales et scientifiques denses (extraits disponibles sur demande)
- Validation du traitement en études cliniques contrôlées




Recommandation EAU

- Plus de **60 000 patients déjà traités avec succès** dans 30 pays

Ce qui paraît acquis à ce jour:

- Effets comparables aux IPDE5
- Effet persistant > 1 an
- Traitement indolore et non invasif
- Pas d'effets secondaires


UNE EFFICACITE DURABLE PROUVEE PAR DES ETUDES CLINIQUES

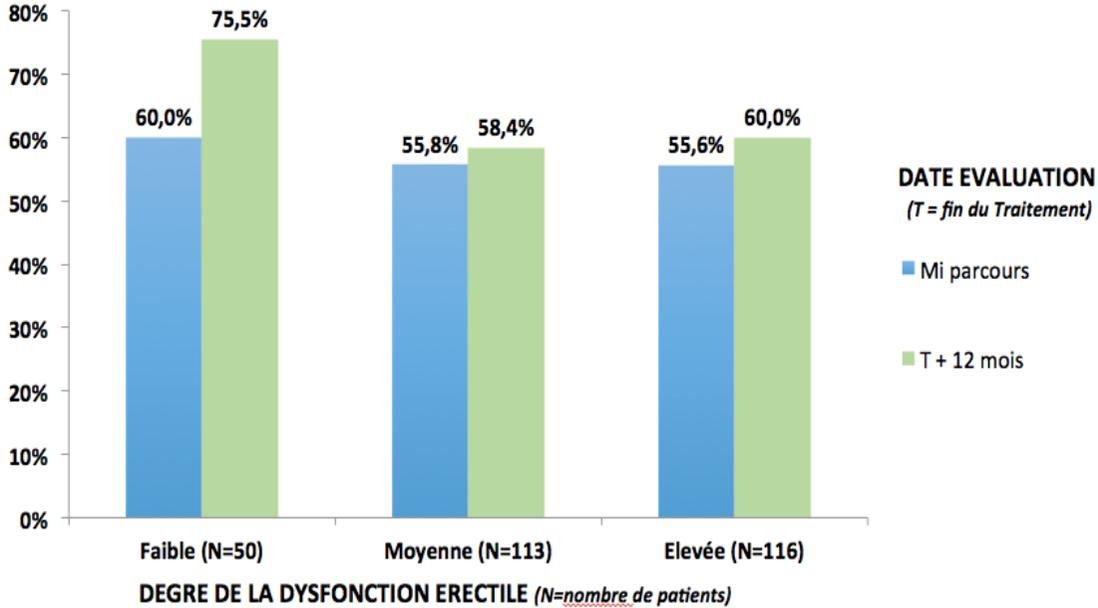

Source: Etudes cliniques - R.A. Feldman et al # Ottawa 2015

EFFET DURABLE MEME SUR 2 ANS

1 POURQUOI LES ONDES DE CHOC ?

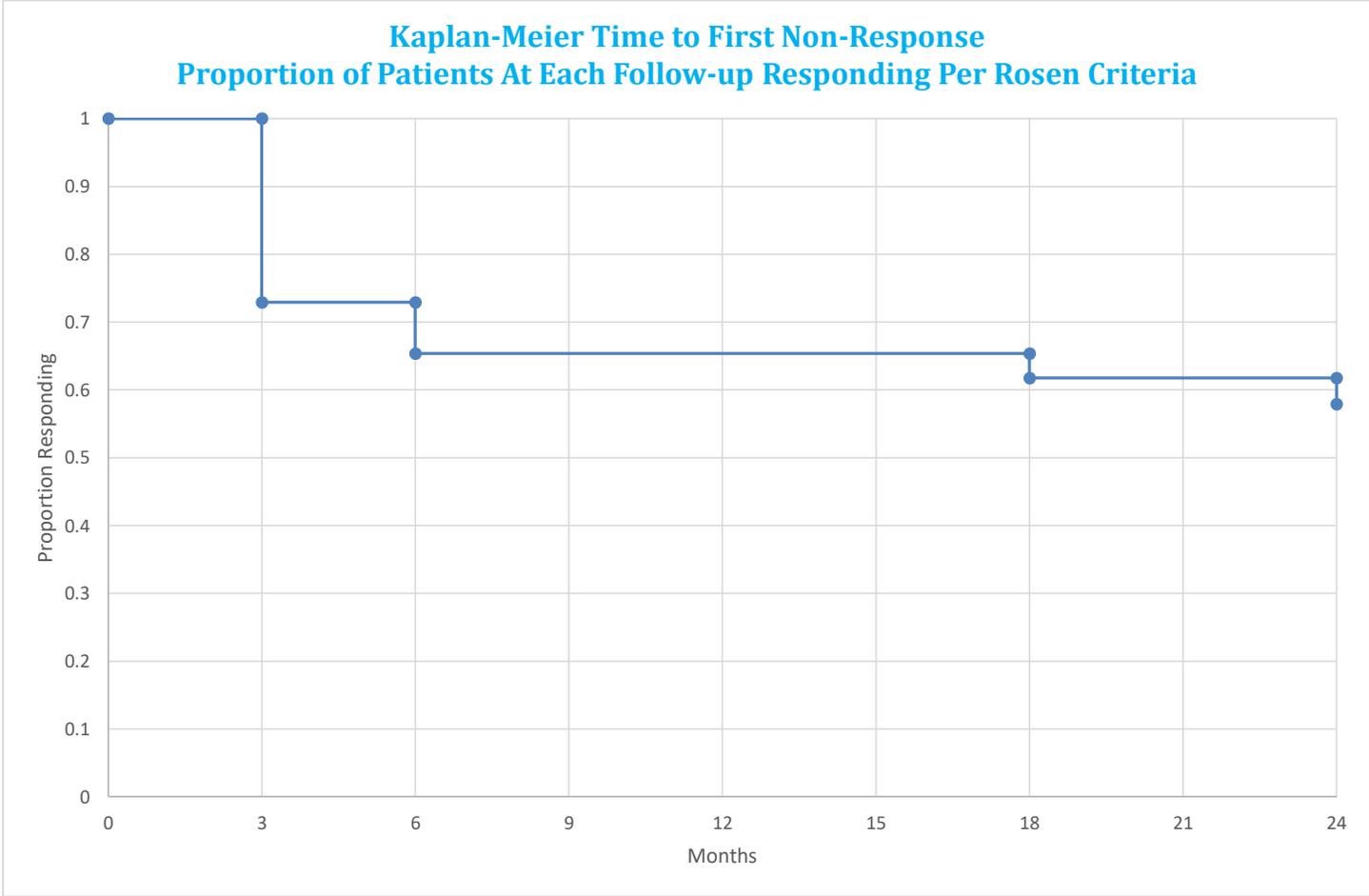

Two-years follow up Israel- responders


FORMATION AU TRAITEMENT / AGENDA

1. POURQUOI DES ONDES DE CHOC POUR TRAITER LA D.E ?
- 2. PARCOURS DU PATIENT**
 1. QUI EST ELIGIBLE ?
 2. DUREE DU TRAITEMENT
3. PRESENTATION DU MATERIEL
 1. MEDISPEC
 2. PRISE EN MAIN
 3. L'APPLICATEUR D'ONDES DE CHOCS
4. PROTOCOLE OBLIGATOIRE: TRAITEMENT DES CINQ ZONES
5. AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS D'USAGE
6. LE CENTRE DE TRAITEMENT ET NOVELATOR

DANS QUEL CAS CE TRAITEMENT EST-IL POSSIBLE ?



Pour les patients dont la D.E est d'origine vasculaire avérée, i.e. sans pathologie hormonale, neurologique ou psychologique.

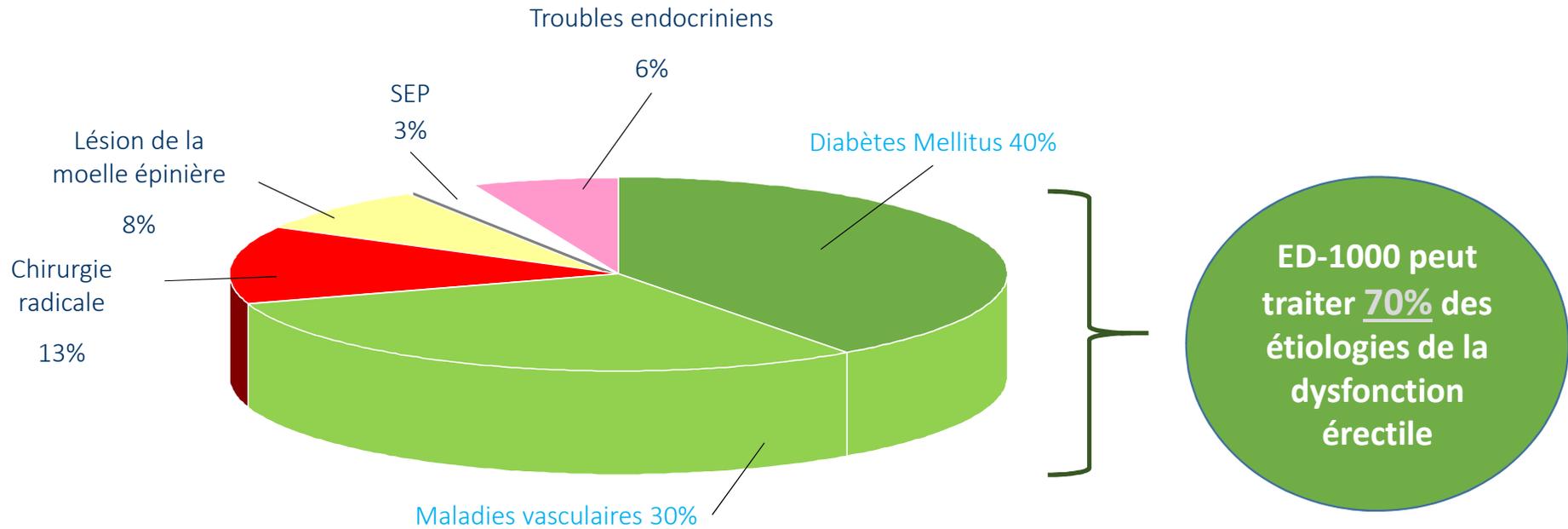

Graph source: Graham Jackson, Consultant Cardiologist, Guy's & St Thomas' Hospital, London, UK.

ED-1000 POUR QUELS PATIENTS ?

Dysfonction érectile liée à:

- Des facteurs de risque cardio-vasculaires :
 - sédentarité, obésité, tabagisme, ...

ET/OU

- Maladie cardio-vasculaire :
 - HTA, dyslipidémie, coronaropathie, artériopathie chronique des membres inférieurs, ...

ET/OU

- Diabète

Dans ce contexte de DE vasculaire, tous les patients sont éligibles qu'ils soient répondeurs ou non aux IPDE5.
Il n'y a aucune contrainte d'arrêt du traitement existant : IPDE5 ou IIC.


ED-1000 NON VALABLE POUR ?

En dehors de ces indications l'efficacité de l'ED1000 Medispec est peu probable.

C'est particulièrement vrai pour la DE post-prostatectomie, plus largement post chirurgie carcinologique ou radiothérapie pelvienne.

Patients concernés par les cas suivants ne sont PAS éligibles :

- Toute cause de DE autre que vasculaire
- Patients qui ont une tumeur pénienne
- Patients qui ont une tumeur à la prostate
- Patients qui ont une tumeur aux testicules
- Patients qui ont une tumeur localisée sur la zone à traiter
- Patients qui ont une plaie cutanée sur la zone à traiter
- Patients qui ont une infection sur la zone à traiter

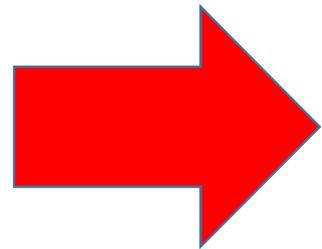

CONTRE-INDICATIONS & PRECAUTIONS



CONTRE-INDICATIONS

- Traitement anticoagulant
- Coagulopathie
- Maladie de Lapeyronie ?




PRECAUTIONS

- Antiagrégants
- Antiinflammatoires non stéroïdiens

FORMATION AU TRAITEMENT / AGENDA

1. POURQUOI DES ONDES DE CHOC POUR TRAITER LA D.E ?
- 2. PARCOURS DU PATIENT**
 1. QUI EST ELIGIBLE ?
 - 2. DUREE DU TRAITEMENT**
3. PRESENTATION DU MATERIEL
 1. MEDISPEC
 2. PRISE EN MAIN
 3. L'APPLICATEUR D'ONDES DE CHOCS
4. PROTOCOLE OBLIGATOIRE: TRAITEMENT DES CINQ ZONES
5. AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS D'USAGE
6. LE CENTRE DE TRAITEMENT ET NOVELATOR

PROTOCOLE DE SUIVI DU PATIENT

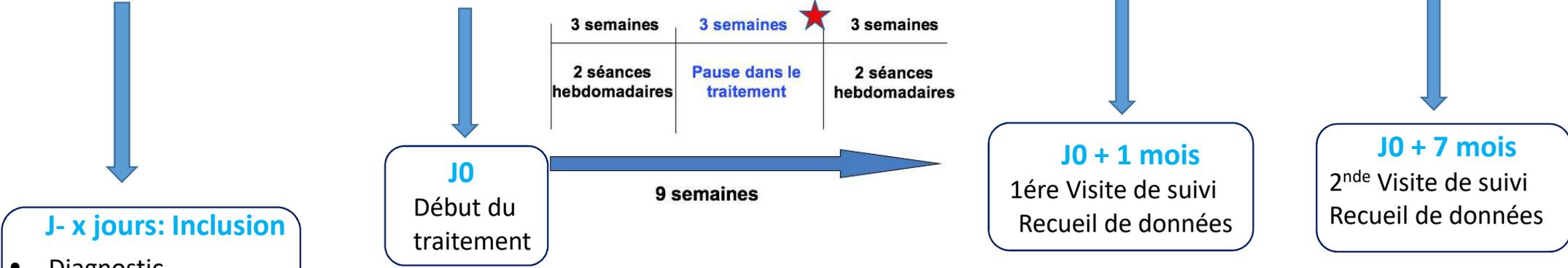

★ Visite pour décider de la poursuite du traitement

PROTOCOLE DE SUIVI DU PATIENT II

2 PARCOURS DU PATIENT


PARAMETRES D'EVALUATION	VISITE 1 EVALUATION PAR LE MEDECIN PRESCRIPTEUR	PHASE DE TRAITEMENT						VISITE 2 EVALUATION EFFICACITE DES 6 PREMIERES SEANCES	PHASE DE TRAITEMENT						VISITE 3 J0 + 7 MOIS
		Semaine 1		Semaine 2		Semaine 3			Semaine 7		Semaine 8		Semaine 9		
		1	2	1	2	1	2		1	2	1	2	1	2	
Antériorité de la D.E	X														
Critères d'inclusion / exclusion	X														
Questionnaire IIEF-EF Domain score								X						X	X
Questionnaire Erection Hardness Grading Scale (EHGS)								X							X
Traitement		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Evénements contraires								X							X
Enquête sur la prise d'iPDE5								X							X

FORMATION AU TRAITEMENT / AGENDA

1. POURQUOI DES ONDES DE CHOC POUR TRAITER LA D.E ?
2. PARCOURS DU PATIENT
 1. QUI EST ELIGIBLE ?
 2. DUREE DU TRAITEMENT
- 3. PRESENTATION DU MATERIEL**
 - 1. MEDISPEC**
 2. PRISE EN MAIN
 3. L'APPLICATEUR D'ONDES DE CHOCS
4. PROTOCOLE OBLIGATOIRE: TRAITEMENT DES CINQ ZONES
5. AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS D'USAGE
6. LE CENTRE DE TRAITEMENT ET NOVELATOR

MEDISPEC, FABRIQUANT DE L'ED1000

- 1992
- Spécialiste et leader des traitements par ondes de choc
- Des milliers de machines brevetées équipent le monde
- Leader aux USA depuis 2001
- Inventeur du traitement de la D.E par ondes de choc, avec Pr Vardy
- Plus de 60K patients soignés

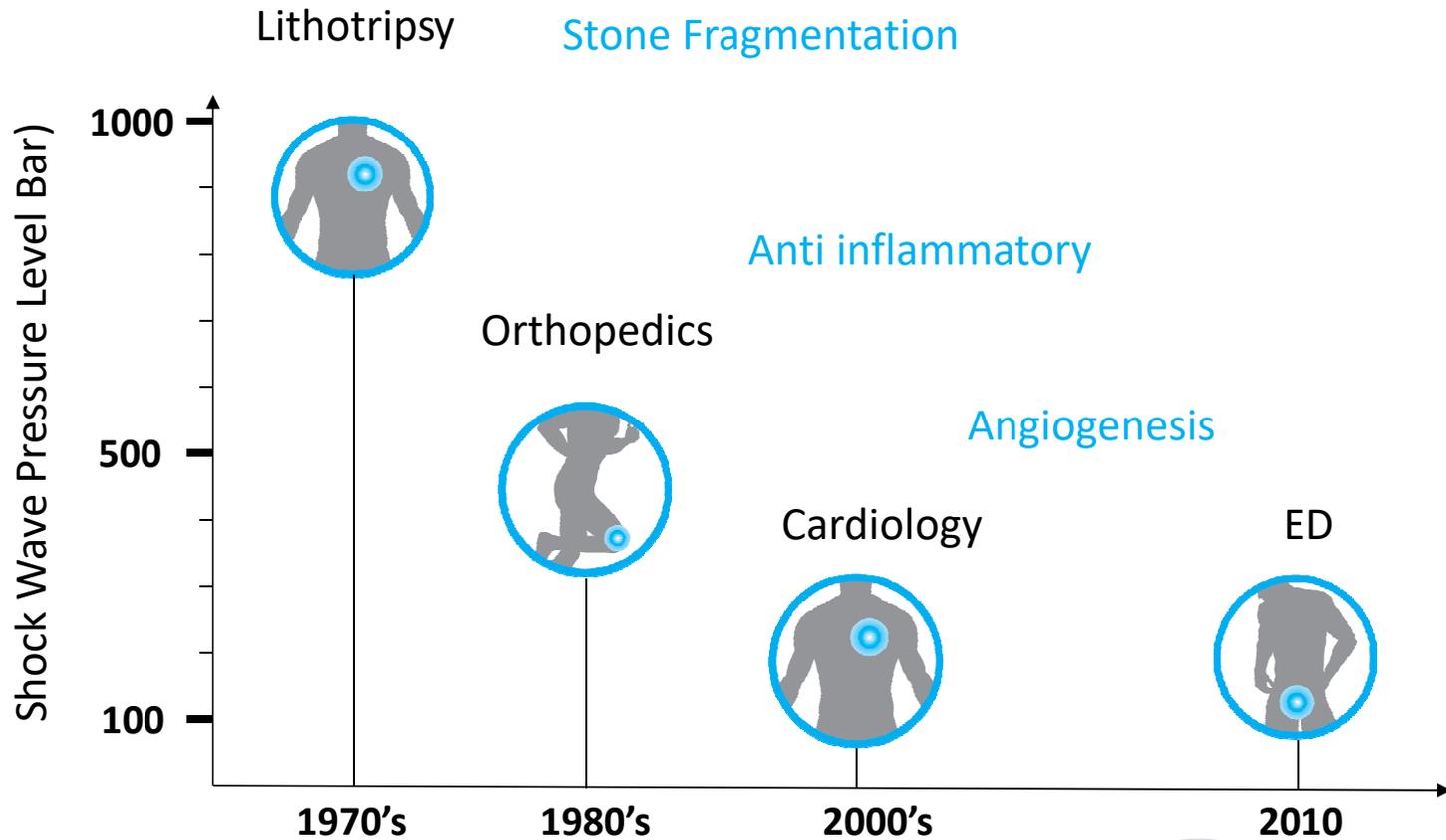

FORMATION AU TRAITEMENT / AGENDA

1. POURQUOI DES ONDES DE CHOC POUR TRAITER LA D.E ?
2. PARCOURS DU PATIENT
 1. QUI EST ELIGIBLE ?
 2. DUREE DU TRAITEMENT
- 3. PRESENTATION DU MATERIEL**
 1. MEDISPEC
 - 2. PRISE EN MAIN**
 3. L'APPLICATEUR D'ONDES DE CHOCS
4. PROTOCOLE OBLIGATOIRE: TRAITEMENT DES CINQ ZONES
5. AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS D'USAGE
6. LE CENTRE DE TRAITEMENT ET NOVELATOR

VOTRE MATERIEL ED1000



Ecran de contrôle LCD




Bouton Marche / Arrêt

Applicateur d'ondes de choc

Dimensions: 90 X 130 mm



ECRAN PRINCIPAL: FONCTIONS DE PILOTAGE

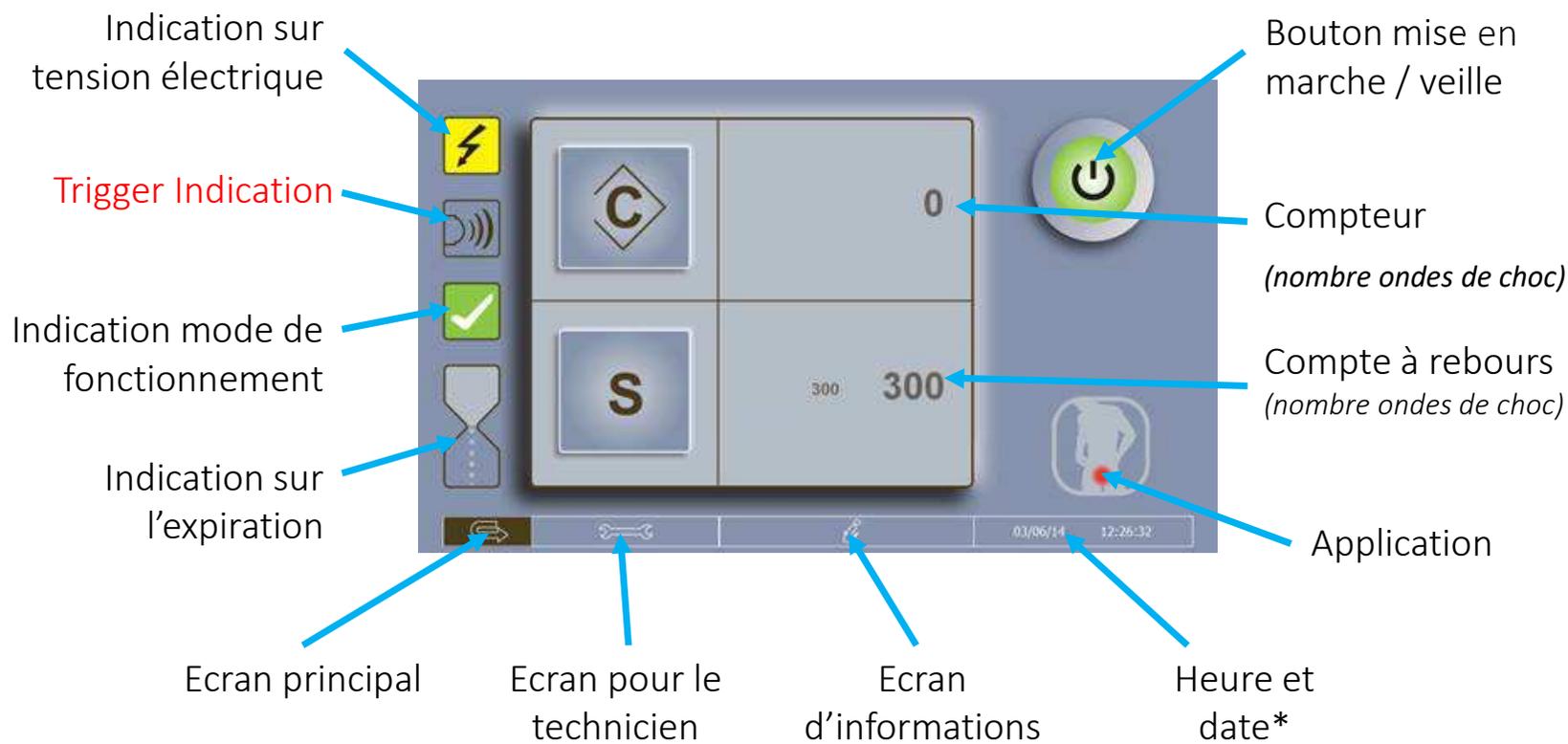


***IMPORTANT:** La date doit être exacte. Le premier déclenchement d'onde de choc calcule la date d'expiration de l'applicateur.

MISE EN ROUTE DU MATERIEL

3


LE MATERIEL

1. Brancher l'appareil à la prise électrique,
2. Mettre l'appareil en marche en appuyant sur le bouton "Marche / Arrêt",
3. Indiquer le nombre d'ondes de choc à décompter (ou bien 0 en mode incrémental),
4. Appuyer sur "Enter" pour revenir au menu principal.

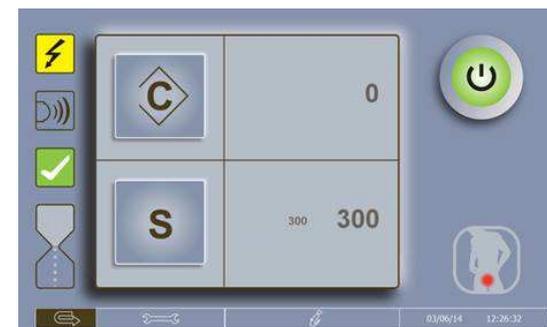

Bouton
marche / arrêt

PROGRAMMATION DES ONDES DE CHOC

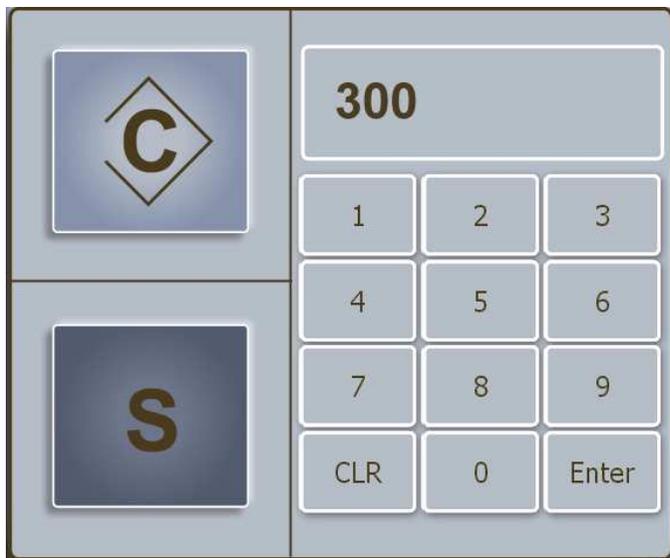

Pré-enregistrement du compte à rebours




Dans cet exemple, 50 ondes de choc sur les 300 pré enregistrées ont été appliquées. Il en reste donc 250.

FORMATION AU TRAITEMENT / AGENDA

1. POURQUOI DES ONDES DE CHOC POUR TRAITER LA D.E ?
2. PARCOURS DU PATIENT
 1. QUI EST ELIGIBLE ?
 2. DUREE DU TRAITEMENT
- 3. PRESENTATION DU MATERIEL**
 1. MEDISPEC
 2. PRISE EN MAIN
 - 3. L'APPLICATEUR D'ONDES DE CHOCS**
4. PROTOCOLE OBLIGATOIRE: TRAITEMENT DES CINQ ZONES
5. AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS D'USAGE
6. LE CENTRE DE TRAITEMENT ET NOVELATOR

INSERTION DE L'APPLICATEUR

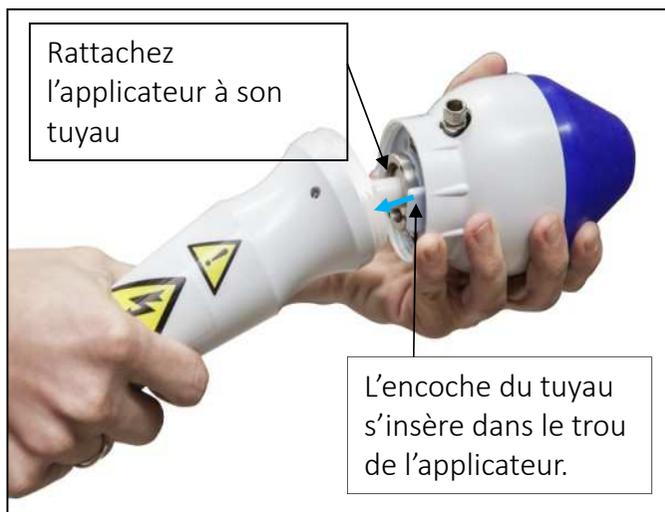

Etape # 1

Insérez l'applicateur dans le compartiment prévu à cet effet. Assurez-vous que l'encoche soit bien positionnée.



Etape # 2

Insérez l'applicateur et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre

ECRAN DE CONTRÔLE

Numéro de série du matériel







Partie dédiée au système

Partie dédiée à l'applicateur

Solde d'ondes de choc

Date d'expiration

Numéro de série de l'applicateur

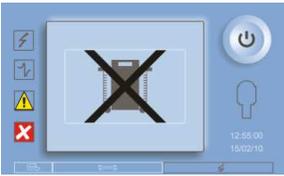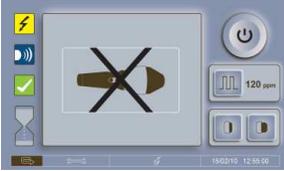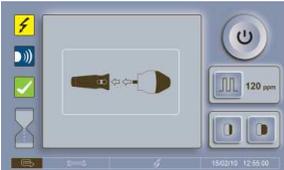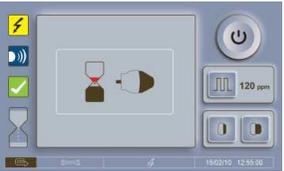Description	Affichage écran	Testez les LEDS suivantes dans la partie dédiée au technicien	Se reporter aux sections
Défaillance du matériel ou du logiciel		1. Alimentation électrique défectueuse	5.1
		2. communication	5.2
Applicateur non compatible		1. Terminal voltage	5.3
		2. Base d'informations de l'applicateur	5.4
L'applicateur n'est pas correctement connecté ! Reconnectez-le et appuyez sur le bouton ON		1. Verrouillage	5.5
L'applicateur est expiré			3.6.6

PREMIER REMPLISSAGE DE L'APPLICATEUR (1/2)

3

LE MATERIEL



Etape # 1

Remplissez la seringue de 100 cc de solution aqueuse



Etape # 2

Otez l'embout en caoutchouc



Etape # 3

Insérez l'adaptateur de la seringue dans la valve

PREMIER REMPLISSAGE DE L'APPLICATEUR (2/2)



Etape # 4

Insérez la conduite de la seringue dans son adaptateur



Etape # 5

Ouvrez la valve dans le sens inverse des aiguilles d'une montre



Etape # 6

Remplissez l'appliqueur de solution aqueuse et supprimez l'air de ce même applicateur

Etape # 7

Fermez la valve dans le sens des aiguilles d'une montre

Etape # 8

Détachez l'adaptateur de la seringue de la valve

RETIREZ L'AIR DE L'APPLICATEUR TOUS LES JOURS

3

LE MATERIEL



AVANT CHAQUE JOUR DE TRAITEMENT:

Supprimez toute bulle d'air à l'aide de la petite seringue.

Pour ce faire, employez la même méthode d'élimination de bulles d'air utilisée avec la grande seringue.

***IMPORTANT:** L'élimination des bulles d'air contenues dans l'applicateur est primordiale afin d'éviter toute atténuation dans l'efficacité du traitement.





FORMATION AU TRAITEMENT / AGENDA

1. POURQUOI DES ONDES DE CHOC POUR TRAITER LA D.E ?
2. PARCOURS DU PATIENT
 1. QUI EST ELIGIBLE ?
 2. DUREE DU TRAITEMENT
3. PRESENTATION DU MATERIEL
 1. MEDISPEC
 2. PRISE EN MAIN
 3. L'APPLICATEUR D'ONDES DE CHOCS
- 4. PROTOCOLE OBLIGATOIRE: TRAITEMENT DES CINQ ZONES**
5. AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS D'USAGE
6. LE CENTRE DE TRAITEMENT ET NOVELATOR

PROTOCOLE OBLIGATOIRE: 5 ZONES A TRAITER

4

LE PROTOCOLE

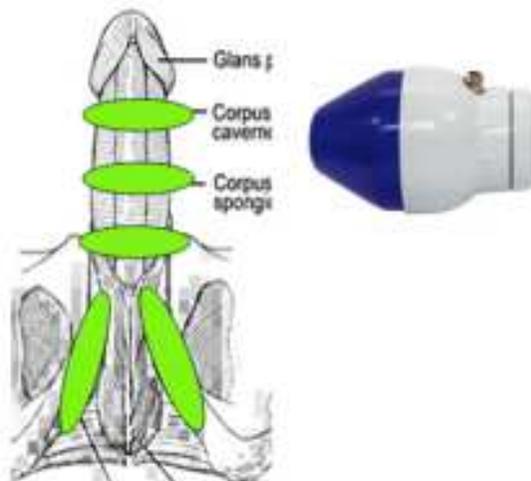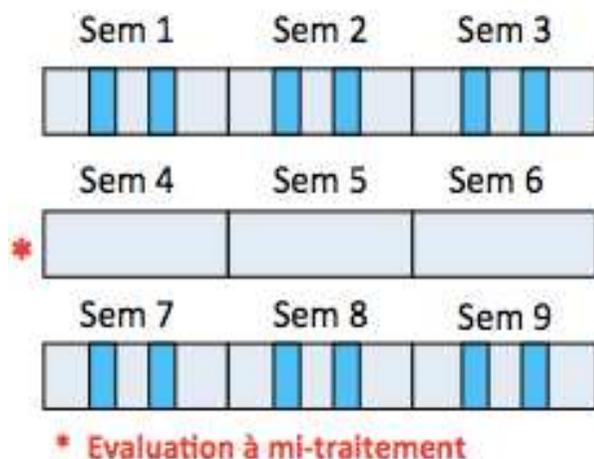

Traitement en 12 séances sur 9 semaines

- Durée d'une séance: 20 minutes
 - 2 séances par semaine durant 3 semaines
 - 3 semaines de repos pour permettre une évaluation de l'efficacité du traitement à mi-parcours*
 - 2 séances par semaine durant 3 semaines
- Application des ondes sur les 5 zones identifiées (en vert sur le schéma)
 - 300 ondes de choc de 0.09 mJ/mm^2 par zone
 - 1 500 ondes par séance
 - 18 000 ondes de choc sur l'ensemble du protocole standard

TRAITEMENT DU PENIS

4

LE PROTOCOLE

1. Etirez le pénis et décalottez le gland
2. Positionnez le centre de la membrane de l'applicateur sur le corps du pénis, de manière perpendiculaire
3. Appliquez **300 ondes de choc sur chacune des trois zones** du pénis:
 - a. Juste sous le gland
 - b. Au centre du pénis
 - c. Au-dessus de la base
4. Utilisez abondamment du gel ultrason sur chacune des zones traitées



TRAITEMENT DES DEUX RACINES DES CORPS CAVERNEUX



4

LE PROTOCOLE

1. Repérez l'os pubien du patient
2. Appliquez **300 ondes de choc** au dessous de l'os pubien et en direction de la racine, comme indiqué sur l'image
3. Répétez la procédure de l'autre côté en appliquant **300 ondes de choc** supplémentaires


* **IMPORTANT**: utilisez généreusement du gel adéquat avant toute application d'ondes de choc

adéquat avant toute application d'ondes de choc

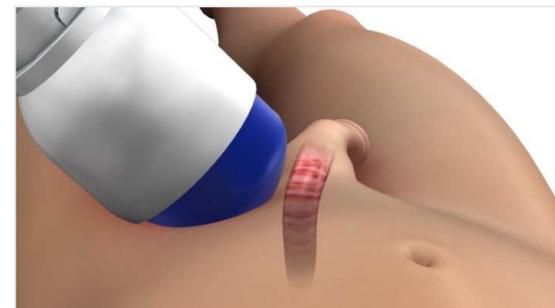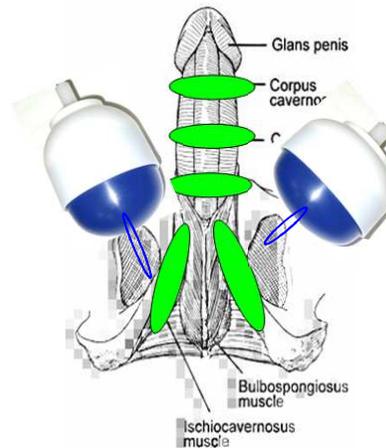


TRAITEMENT DES DEUX RACINES DES CORPS CAVERNEUX

VUE LATÉRALE

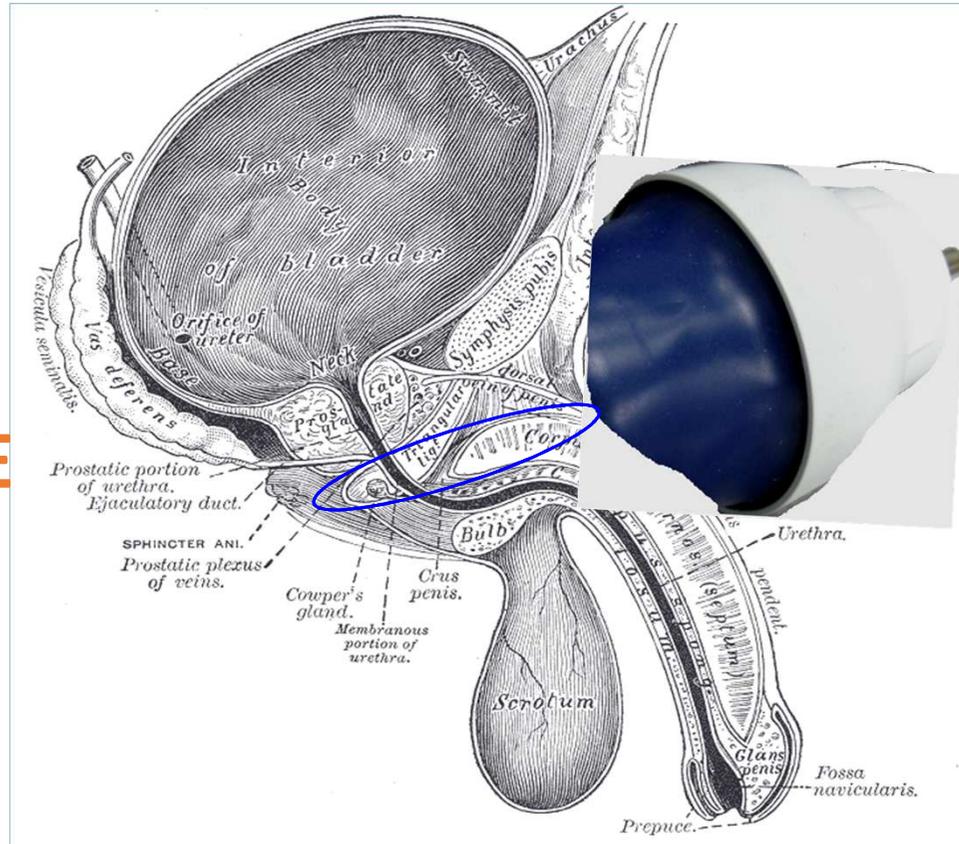

TRAITEMENT DES RACINES DES CORPS CAVERNEUX

POSITION ALLONGEE

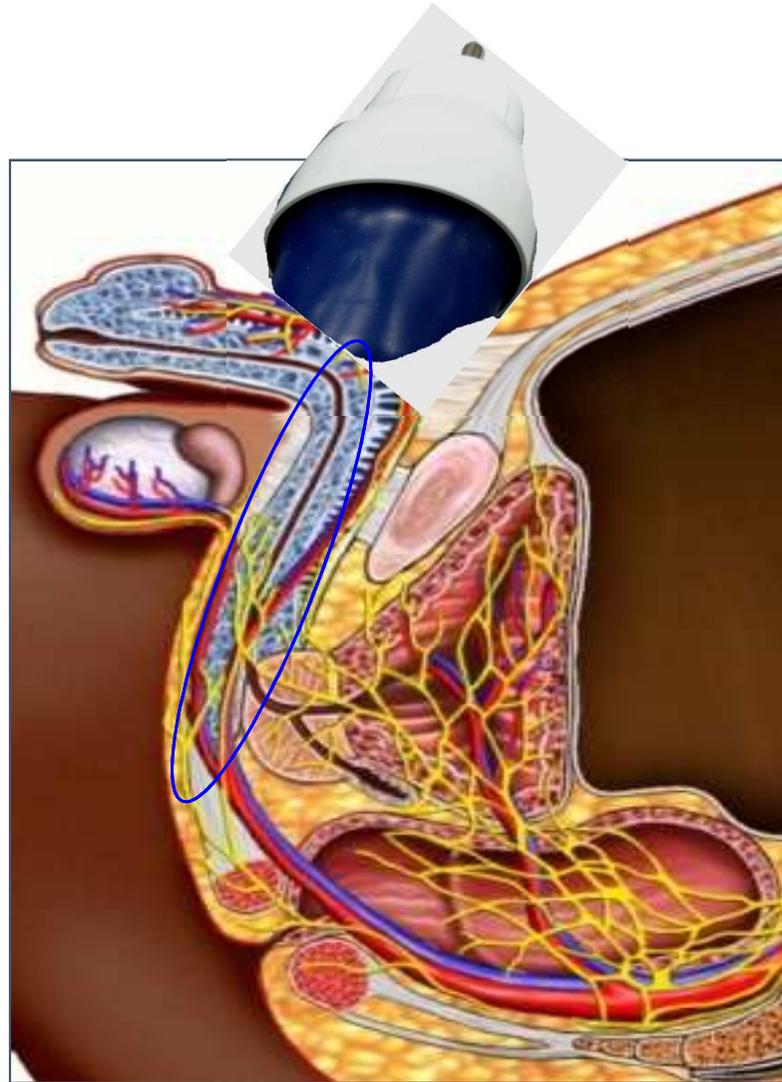

copyrights 2016 Novelator

TRAITEMENT DES DEUX RACINES DES CORPS CAVERNEUX

4

LE PROTOCOLE



EN SYNTHÈSE

- Désinfecter le SWA selon la procédure de désinfection,
- Laisser le patient s'allonger sur le lit, dans une position adéquate au traitement,
- Appuyer sur le bouton de mise en marche et vérifier que vous entendez bien 3 ondes de choc au démarrage,
- Localiser la zone à traiter,
- Appliquer généreusement du gel adapté aux ultrasons, à la fois sur la membrane du SWA et sur la zone à traiter, pour une meilleure fluidité entre la peau et le SWA,
- Vérifier que le contact entre le centre de la membrane et la peau du patient soit bon. Assurez-vous de l'absence de poches d'air entre ces deux parties,
- Appuyer sur le bouton de réinitialisation afin d'effacer les comptages précédents,
- Appuyer sur le bouton de commande (sur le SWA ou la pédale en fonction du modèle),
- Garder le centre de la membrane perpendiculaire à la zone traitée,
- Appliquer les ondes de choc en respectant le protocole pour chaque zone à traiter,
- Utiliser le bouton de rechargement pour appliquer le traitement sur la zone suivante (uniquement en mode à rebours),
- Une fois la procédure de traitement achevée, nettoyer le SWA en suivant les instructions de nettoyage et de désinfection, puis replacer le SWA dans son boîtier,
- Utiliser des mouchoirs doux afin de nettoyer la zone du patient qui a été traitée,
- Pour arrêter la machine, presser le bouton de commande afin de désactiver la haute tension puis appuyer sur le bouton OFF.

IMPORTANT:

Afin d'éviter tout risque de contagion, nettoyer la membrane à la fin du traitement et la désinfecter avant tout démarrage de traitement.

Afin d'éviter tout risque de contagion, nettoyer la membrane à la fin du traitement et la désinfecter avant tout démarrage de traitement.

FORMATION AU TRAITEMENT / AGENDA

1. POURQUOI DES ONDES DE CHOC POUR TRAITER LA D.E ?
2. PARCOURS DU PATIENT
 1. QUI EST ELIGIBLE ?
 2. DUREE DU TRAITEMENT
3. PRESENTATION DU MATERIEL
 1. MEDISPEC
 2. PRISE EN MAIN
 3. L'APPLICATEUR D'ONDES DE CHOCS
4. PROTOCOLE OBLIGATOIRE: TRAITEMENT DES CINQ ZONES
- 5. AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS D'USAGE**
6. LE CENTRE DE TRAITEMENT ET NOVELATOR

AVERTISSEMENTS (1/2)

- Tout utilisateur du matériel ED1000 doit être **COMPETENT** dans la **connaissance anatomique** de toutes les zones traitées, ainsi que dans la **manipulation adéquate de l'ED1000** et dans **l'application des ondes de choc** (le bon nombre au bon endroit avec l'intensité d'énergie adaptée)
- Le traitement thérapeutique de la D.E par l'ED1000 est indiqué et doit être exécuté sous la **surveillance d'un médecin formé**
- Au cas où certains patients potentiels seraient sous **médication à base d'anticoagulants**, le médecin traitant devra prendre en compte le risque de saignement inhérent et considérer un **changement de régime médicamenteux à base d'anticoagulants** avant toute application du traitement à base d'ondes de choc.

La personne qualifiée qui pratique le traitement devra toujours:

- diriger le **centre de la membrane de l'applicateur vers le centre de la zone traitée**. Cependant, une très légère déviation n'aura pas d'impact significatif sur la qualité des résultats, puisque la focale utilisée par l'ED1000 est suffisamment large pour obtenir en ce cas, un effet thérapeutique.
- s'assurer qu'avant tout démarrage du traitement, **une couche de gel à ultrasons de 2 à 3 mm** soit correctement étalée et ce de manière égale sur toutes les zones à traiter.
- éviter de diriger le point focal de l'appareil sur d'autres zones que **celles spécifiées dans le protocole de traitement**.
- Interrompre ou cesser le traitement si le patient ressent des **phases de douleurs ou d'inconfort** pendant l'application des ondes de choc.

PRECAUTIONS D'USAGE


5 AVERTISSEMENTS

- **Ne pas enlever le capot du matériel.** Ce dernier contient des circuits d'alimentation électrique à haute-tension capables de causer des blessures graves voire mortelles en cas de décharge électrique.
- En cas de dysfonctionnement du matériel pendant le traitement, **l'efficacité des effets thérapeutiques attendus pourrait en être altérée.**

FORMATION AU TRAITEMENT / AGENDA

1. POURQUOI DES ONDES DE CHOC POUR TRAITER LA D.E ?
2. PARCOURS DU PATIENT
 1. QUI EST ELIGIBLE ?
 2. DUREE DU TRAITEMENT
3. PRESENTATION DU MATERIEL
 1. MEDISPEC
 2. PRISE EN MAIN
 3. L'APPLICATEUR D'ONDES DE CHOCS
4. PROTOCOLE OBLIGATOIRE: TRAITEMENT DES CINQ ZONES
5. AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS D'USAGE
- 6. LE CENTRE DE TRAITEMENT ET NOVELATOR**

REPARTITION DU PAIEMENT

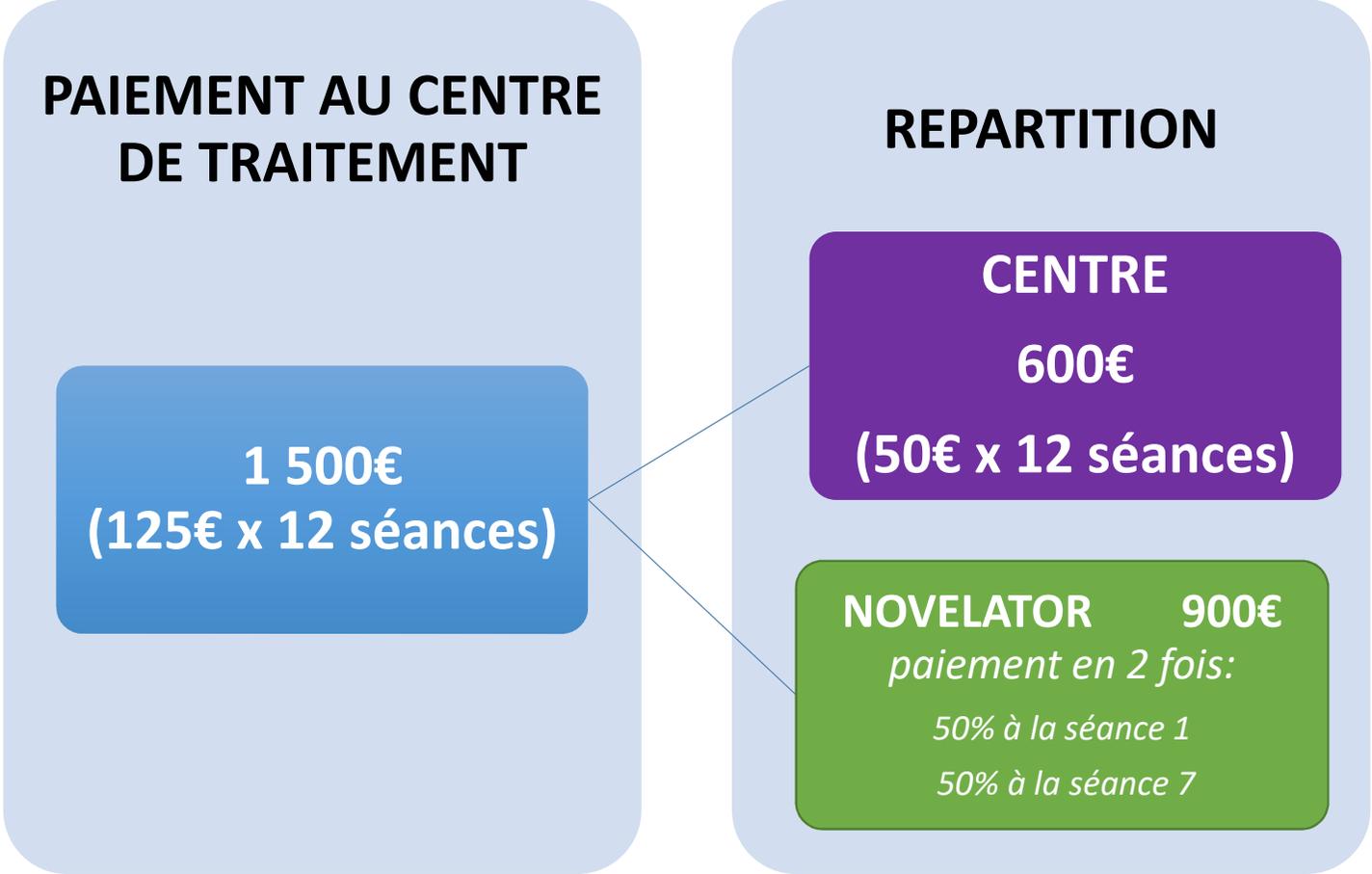

IMPORTANT:
Règlement via le moyen de paiement NOVELATOR fourni (TPE ou site Internet)

site internet)
paiement NOVELATOR fourni (TPE ou
paiement via le moyen de

PREMIERE PARTIE DU TRAITEMENT

LORS PREMIER RENDEZ-VOUS AVEC LE PATIENT

- Planification des 12 séances
- Planification de la visite intermédiaire (après 6 séances) avec le médecin prescripteur
- Enregistrement du numéro du patient (pour le registre) et du numéro du prescripteur dans le cahier fourni par Novelator
- Encaissement des 450 euros (75€ x 6) sur le moyen de paiement Novelator pour les 6 premières séances
- Encaissement des 300 euros (50€ x 6) directement au praticien du traitement

AU DEMARRAGE DE LA 4^{ème} SEANCE

- Evaluation de la satisfaction du patient sur une échelle de 1 à 10 (10 étant le maximum de satisfaction)

A L'ISSUE DE LA VISITE INTERMEDIAIRE POST 6 SEANCES

- Confirmer avec le patient le rendez-vous de prochaine séance
- En cas d'arrêt du traitement, en préciser les raisons dans le cahier du registre fourni

DEUXIEME PARTIE DU TRAITEMENT

AU DEMARRAGE DE LA 7^{ème} SEANCE

- Planification des 6 séances restantes
- Evaluation de la satisfaction du patient sur une échelle de 1 à 10 (10 étant le maximum de satisfaction)
- Encaissement des 450 euros (75€ x 6) sur le moyen de paiement Novelator pour les 6 premières séances
- Encaissement des 300 euros (50€ x 6) directement au praticien du traitement

A L'ISSUE DE LA 12^{ème} SEANCE

- Indiquez la date de fin du traitement dans le cahier fourni

NE PAS OUBLIER

- Notez chaque séance dans le cahier fourni

REMONTÉE MENSUELLE D'INFORMATIONS

Le premier jour de chaque mois, le Centre de Traitement adressera à l'Opérateur un **rapport mensuel** pour le mois écoulé. Ce rapport sera adressé par e-mail ou tout autre moyen et contiendra notamment les informations suivantes :

- Nombre de patients traités,
- Nombre de séances réalisées,
- Effets du traitement observés (données anonymes),
- Photo du compteur d'ondes de choc intégré au Matériel de Traitement ainsi que du cahier du Registre,
- Actions de formation et plans de communication autour du traitement.

PHOTO DU COMPTEUR D'ONDES DE CHOC

6 PARTENARIAT
NOVELATOR

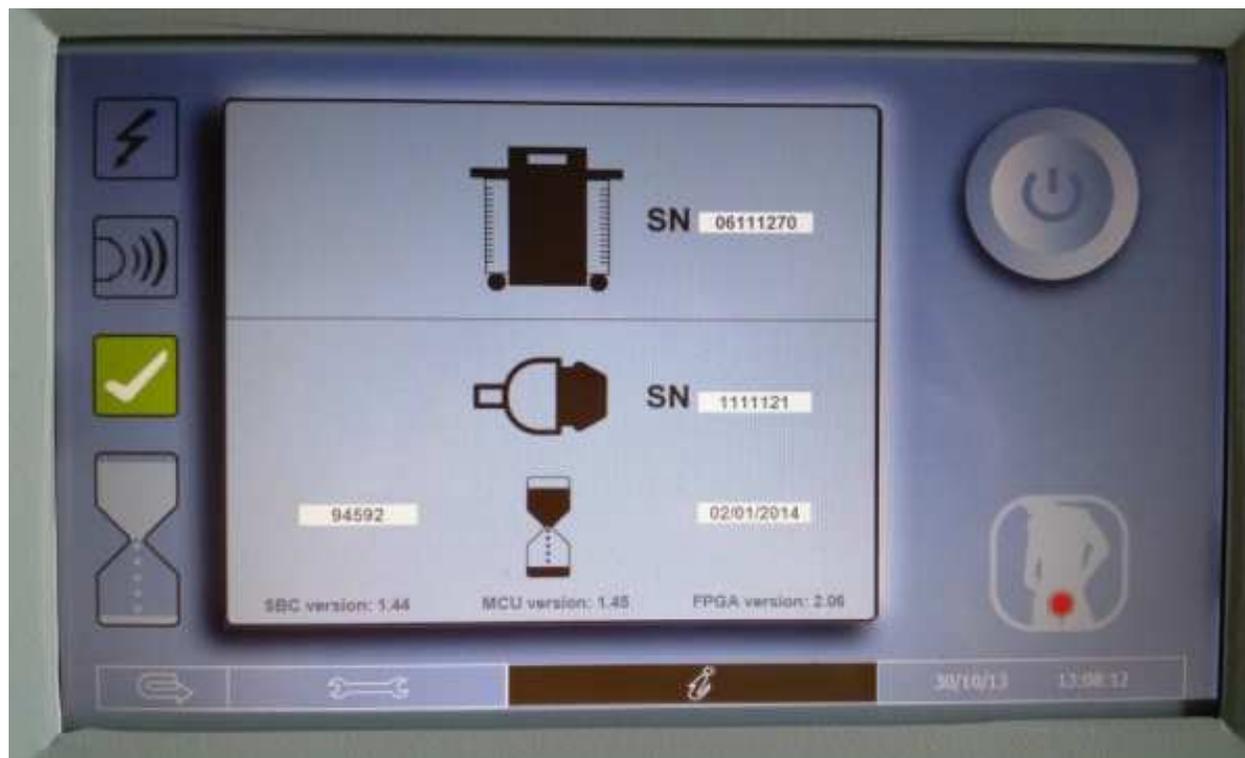



PHOTO DU COMPTEUR:

A envoyer au début de
chaque mois à Novelator

chaque mois à Novelator
A envoyer au début de



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

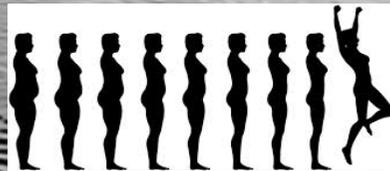

VOTRE CONTACT

Dan WAYSMAN

Mail: dan@novelator.com

Mobile: 06 89 86 26 82

Et notre site: <http://novelator.com>